


# Nutzung von KN95- /FFP2- /N95- Atemschutzmasken

Wenn sie ordnungsgemäss getragen werden, können KN95-, FFP2- und N95-Atemschutzmasken einen gewissen Schutz vor COVID-19 bieten. Diese Atemschutzmasken sind eng anliegend, und die Atmung kann beim Tragen erschwert sein. Atemschutzmasken müssen ordnungsgemäss getragen und gepflegt werden, damit sie das erwartete Ausmass an Schutz bieten. Die Gebrauchsanleitung und die Tipps unten sollten bei der Verwendung einer KN95-, FFP2- oder N95-Atemschutzmaske auf der Arbeit bei ELC beachtet werden.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

- 1) Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie die Atemschutzmaske anlegen.
- 2) Fassen Sie die Atemschutzmaske an den Bändern an und überprüfen Sie sie, um mögliche Beschädigungen auszuschliessen.
- 3) Ziehen Sie die Bänder über Ihre Ohren und stellen Sie sicher, dass die Atemschutzmaske eng unter Ihrem Kinn anliegt.
- 4) Drücken Sie das Nasenstück fest auf Ihren Nasenrücken und jeweils seitlich an Ihre Nase.
- 5) Atmen Sie durch die Maske und überprüfen Sie, ob Lecks vorliegen, die Sie dadurch spüren, dass Luft von allen Seiten in Ihre Nase gelangt. Passen Sie Ihr Nasenstück je nachdem, wo sich die undichte Stelle befindet, entsprechend an, wenn Sie feststellen, dass Ihre Atemschutzmaske ein Leck aufweist.

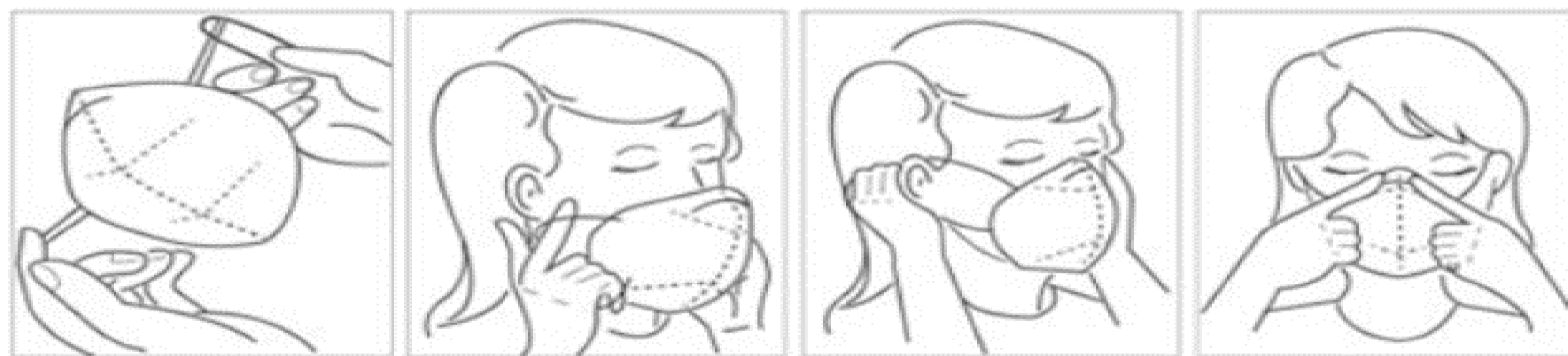

## NÜTZLICHE TIPPS

- Diese Atemschutzmasken entfernen Partikel nicht zu 100 % aus der Luft.
- Sie bieten keinen Schutz vor Gasen oder Dämpfen wie etwa Kohlenmonoxid.
- Diese Atemschutzmasken liefern keinen Sauerstoff.
- Flachfalten-Masken können zusammengelegt aufbewahrt werden, wenn sie sich gerade nicht in Gebrauch befinden.
- Atemschutzmasken können erneut verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäss in einer verschlossenen Papier- oder Plastiktüte oder einem ebensolchen Behälter aufbewahrt und sauber gehalten werden, wobei diese Tüte oder dieser Behälter nur von je einer Person genutzt werden darf.
- Diese Atemschutzmasken sollten jeweils mindestens eine Woche reichen. Tauschen Sie sie jedoch früher aus, wenn die Maske schmutzig wird, das Nasenstück nicht länger passend und fest am Gesicht anliegt, es schwieriger wird, durch die Maske zu atmen, und / oder wenn die Bänder lose werden.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Brille die Abdichtung um Ihre Augen und Nase herum nicht beeinträchtigt. Die Brille sollte auf der Aussenseite der Maske getragen werden.
- Gesichtsbehaarung sollte rasiert werden, damit die Atemschutzmaske das Gesicht fest abdichten kann. (Wenn eine Atemschutzmaske mit Bart getragen wird, ist der Schutzeffekt verringert).
- Bitte wenden Sie sich an Ihren HRBP, falls Sie beim Tragen dieser Maske Probleme irgendeiner Art bekommen.